


## STAN<sup>®</sup> - Viewer

### Die Software zur nachträglichen Bewertung und zur Durchsicht von STAN<sup>®</sup> CTG- Aufzeichnungen

Die Software STAN<sup>®</sup>- VIEWER wird eingesetzt um STAN<sup>®</sup>- Aufzeichnungen nachträglich auf einem externen PC anzuschauen, auszuwerten oder zu begutachten.

Beim Einsatz des STAN<sup>®</sup> entstehen digitale Datensätze sowohl vom CTG als auch von der ST- Analyse. Dabei werden neben den Aufzeichnungen des eigentlichen CTG' s und der Kontrakturen auch sämtliche Verlaufsdaten und Interventionen gespeichert. Es entsteht also die Datei eines Behandlungsfalles. Die so entstandenen Datensätze können nun über die verschiedensten Medien z.B. Netzwerk, USB- Stick etc. zu einem PC transferiert werden.

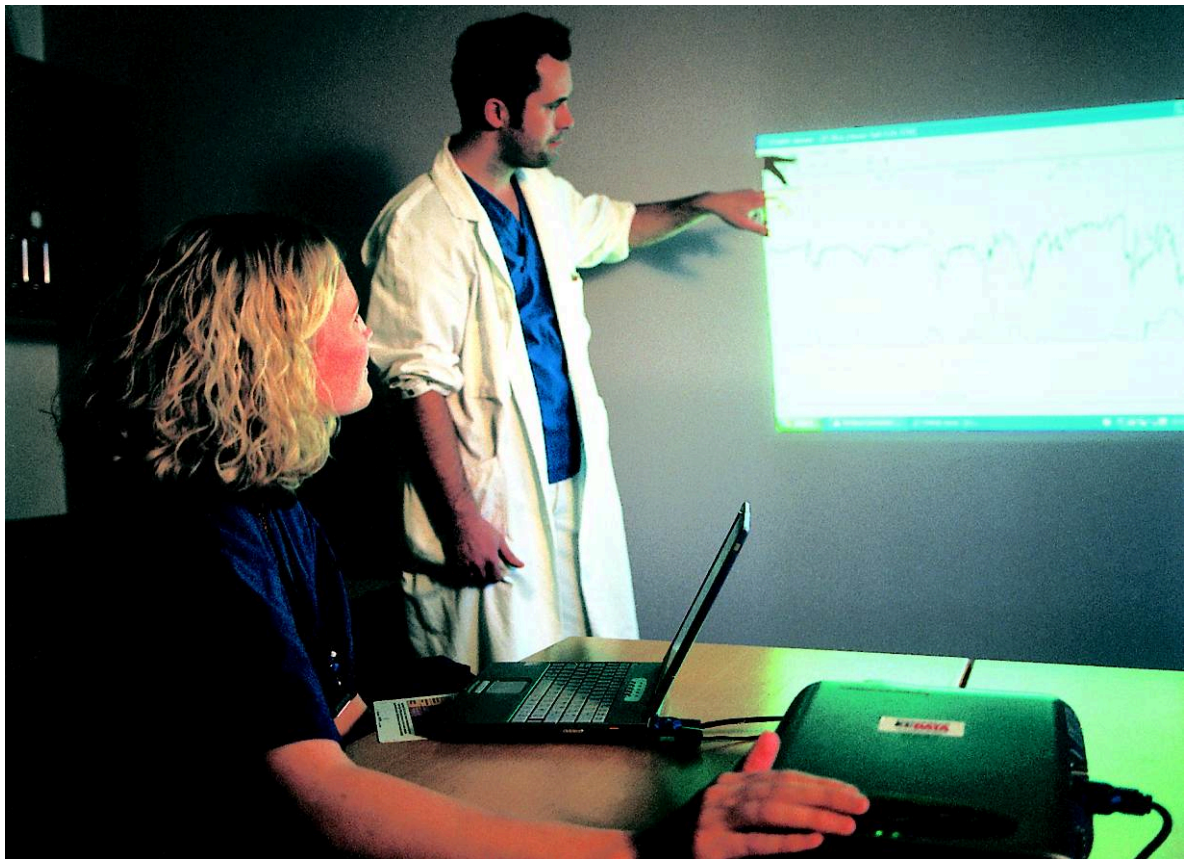


Dieses Verfahren eröffnet vielfältige Möglichkeiten nicht nur im Hinblick auf nachträgliche Bewertung und Befundung. Auch ein erneutes Ausdrucken des Behandlungsverlaufes ist ebenso möglich wie die einfache, anonymisierte Versendung des Datensatzes per e-Mail oder die Archivierung im KIS oder der zentralen Kreissaalsoftware. Natürlich sind hierbei alle datenschutzrelevanten Aspekte zu beachten.

Ob in der Frühbesprechung oder bei der Ausbildung mit dem STAN<sup>®</sup>- VIEWER können Sie vollständige Behandlungsfälle- und Verläufe mit den klinischen Hintergründen im Kollegium oder großen Foren diskutieren und demonstrieren. Eine Anonymisierungsoption ermöglicht Ihnen personenbezogene Daten sicher unkenntlich zu machen und dem Datenschutz gerecht zu werden. Optimal ist diese Software auch für das CTG- Training ob mit oder ohne ST- Analyse geeignet. Die Verlaufsdaten lassen sich unterdrücken, sodass die Fragestellung „Wie würden Sie entscheiden“ simuliert werden kann.

erhältlich unter: Art.-Nr. NE9001



## Die nachstehend gezeigte Bildschirmansicht illustriert die wichtigsten Leistungsmerkmale und Funktionen des STAN® - VIEWER

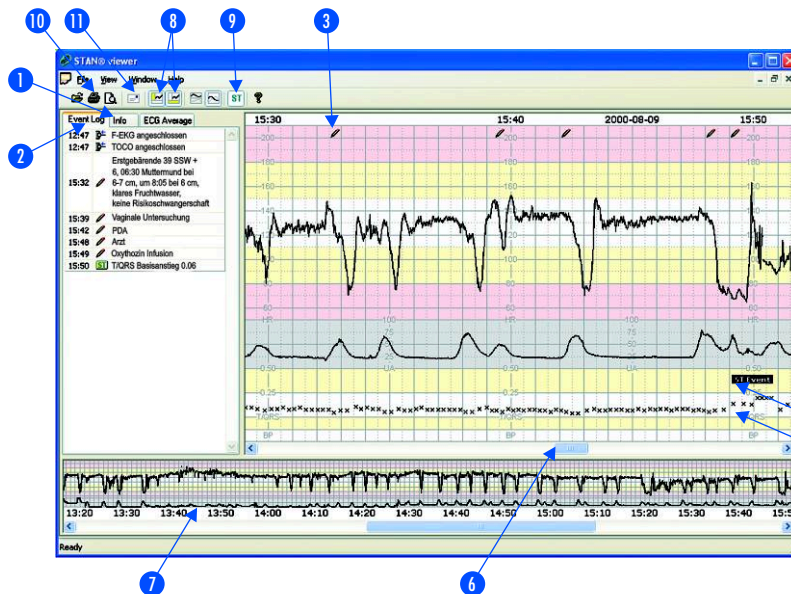

### Systemvoraussetzungen:

**System:**  
Windows® 98, NT, 2000 oder XP  
Internet Explorer mindestens 5.0

**Prozessor:**  
200 MHz mindestens

**Speicher:**  
32 MB RAM

**Graphik:**  
Hochauflösend 16 Bit

Windows ist eine geschütztes Warenzeichen der Microsoft Corp.

### Eigenschaften und Funktionen

1. **INFO** beinhaltet die Patientendetails (Namen & die Patientennummer). Die personenbezogenen Daten können anonymisiert werden, wenn notwendig.
2. **EREIGNISPROTOKOLL/EVENTLOG** speichert die Ereignisse und Behandlungskommentare. Die Eintragungen können entweder automatisch vom System generiert werden, oder im Verlauf der Behandlung, als Behandlungsprotokoll manuell vom Behandlungspersonal eingetragen sein.
3. **MARKER** zeigen schematisch als zeitliche Indikatoren die Behandlungskommentare und Ereignisse an, z.B. der Stift zeigt einen manuellen Behandlungseintrag an. Wird der Cursor über diesen Stift bewegt, wird der dahinter stehende Text sichtbar.
4. **T/QRS-VERHÄLTNIS** wird durch den STAN® berechnet. Wird der Cursor über ein entsprechendes Kreuz der T/QRS-Verhältnis bewegt, wird der zugrundeliegende EKG Komplex angezeigt.
5. **ST-Ereignisse** werden in der Aufzeichnung ausgewiesen. Wird der Cursor über den Hinweis ST-Ereignis bewegt, wird der entsprechende Ereignisprotokolltext für dieses Ereignis angezeigt.
6. **SCROLL- LEISTE** hier kann man mit dem Cursor schnell durch die gesamte Aufzeichnung blättern
7. **ÜBERSICHT** hier wird ein Schnellüberblick über die gesamte Aufzeichnung ermöglicht.
8. **FORMAT FENSTER** hier kann die Bildschirmansicht verändert werden
9. **SCHALTER „ST“** gibt die Möglichkeit die ST-Information ein- bzw. auszuschalten.
10. **DRUCK** Die vielseitige Option ermöglicht Ihnen die originale STAN®-Aufzeichnung zu drucken oder andere Druckkonfigurationen zu wählen.
11. **E-MAIL Option** ermöglicht den Versand des Behandlungsfalles in vollem Umfang ohne patientenbezogene Daten.

Alleinvertrieb Deutschland

**MED CARE**  
VISIONS

Gesellschaft für Beratungs-, Bildungs-,  
Planungsdienstleistungen und  
medizintechnischen Vertrieb mbH

© MEDCARE VISIONS®

Bruckmannring 30 · 85764 Oberschleißheim · Tel.: +49 (0)89-2000433-0 · Fax: +49 (0)89-2000433-99 · info@medcarevisions.de · www.medcarevisions.de

U N S E R W E I T E R E S L I E F E R P R O G R A M M



Inkubatoren & Reanimationseinheiten • Phototherapie & Augenschutz • Wickeltischstrahler/mobile Wärmestrahler • Wärmetherapiesystem BabyNest • Wickeltischauflagen • CTG-Systeme